

INSTALLAZIONE DELLA STAMPANTE

- 1 Togliete i due tappi in gomma situati sotto la stampante.

Tappi in gomma

- 2 Collegate la presa dell'interfaccia alla stampante.

Connessione alimentazione

- 3 Posizionate la stampante sul suo supporto stringendo le 2 viti fornite.

Connessione SubD

Viti (ref. V3021)

Posizionamento dei cavi con 2 strisce autoadesive fornite (ref. C-079)

- 4 Fissate il supporto alla macchina: le viti sulla parte superiore della superficie, dadi e rondelle su quella inferiore.

I Fori per fissare il supporto della macchina



SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI STAMPA



Solo la carta col marchio *Soluscope*® è compatibile per una durata di archiviazione di 10 anni.



1 Aprite il coperchio della stampante.



2 Inserite il rotolo di carta allontanando il portarotolo a destra.



3 Chiudete il coperchio lasciando spuntare all'esterno un piccolo pezzo di carta.



4 Premete il pulsante per verificare il corretto inserimento della carta (se la spia lampeggia, verificare la chiusura del coperchio dei due lati).