

## CYCLES LES PLUS UTILISÉS (liste complète dans le mode d'emploi)

<b>CYCLE 1</b> Simple nettoyage	<b>CYCLE 2</b> Double nettoyage	<b>CYCLE 4</b> Désinfection sans nettoyage	<b>CYCLE 6</b> Auto-désinfection
Test d'étanchéité	Test d'étanchéité	Test d'étanchéité	Après chaque programme quotidien et avant chaque programme si la machine n'a pas été utilisée depuis plus de 72 heures.
Nettoyage	Nettoyage	Désinfection	⚠ Si colmaté, changer le filtre 0,2 µm avant de lancer le cycle 6.
Rinçage	Rinçage	Rinçage	
Désinfection	Nettoyage		Désinfection Filtre à eau terminal 0,2 µm
Rinçage	Rinçage		Désinfection machine
	Désinfection	🕒 10 min*	Recirculation horaire dans les circuits jusqu'à activation du rinçage (touche F3)
	Rinçage		Rinçage différé, lancement par l'utilisateur
🕒 12 min*	🕒 14 min*		🕒 75 min*

\* Les durées des cycles peuvent varier en fonction de la qualité du réseau d'eau, du type d'endoscope, du colmatage des filtres ainsi que de la température de l'eau.




Les instructions contenues sur cette fiche ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement le mode d'emploi.

## LANCER UN CYCLE

Dès la fin de l'endoscopie, faire un prétraitement de l'endoscope avant sa mise en machine. En l'absence d'un protocole validé, voir chapitre 2 du mode d'emploi.

Raccorder l'endoscope au Soluscope ENT avec la connectique adéquate.

Pour les cycles 6 et 8 : connecter 

Pour accéder au départ du menu d'accueil, appuyer sur **MAIN**, le message suivant s'affiche :

Heure courante → 12:22:15 Taper F3  
 Nombre de cycles déjà effectués → 1526 pour démarrer

Appuyer sur **F3** et suivre attentivement les instructions des différents messages sur l'afficheur.

En fin de saisie l'écran suivant doit apparaître :

Cycle choisi → Lancer Cycle 6 : F3  
 1000 NON DE

Référence Endoscope → 

Fermer le capot sans forcer et appuyer sur **F3** pour lancer le cycle.

**MAIN** pour saisir à nouveau les données

**F1** pour interrompre le cycle