

## CICLI PIÙ UTILIZZATI (elenco completo nel manuale d'uso)

<b>CICLO 1</b> Semplice pulizia	<b>CICLO 2</b> Doppia pulizia	<b>CICLO 4</b> Disinfezione senza pulizia	<b>CICLO 6</b> Autodisinfezione
Prova di tenuta	Prova di tenuta	Prova di tenuta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno una volta ogni 24 ore e dopo ogni programma quotidiano.</li> <li>Prima di ogni programma se la macchina non è stata utilizzata da più di 72 ore.</li> <li>⚠ Se intasati, cambiare i filtri prima di lanciare il ciclo 6.</li> </ul>
Pulizia	Pulizia	Disinfezione	Disinfezione <i>Filtro ad acqua terminale 0,2 µm</i>
Risciacquo	Risciacquo	Disinfezione	Disinfezione macchina
Disinfezione	Pulizia		Ricircolo orario nei circuiti fino all'attivazione del risciacquo (tasto <b>F3</b> )
Risciacquo	Risciacquo		Risciacquo differito, lancio dall'utente
12 min*	14 min*	10 min*	75 min*

\* La durata dei cicli può variare in funzione della qualità del circuito di acqua, del tipo di endoscopio, dell'intasamento dei filtri nonché della temperatura dell'acqua.



Le istruzioni di questa scheda non dispensano in alcun modo l'utilizzatore dal leggere attentamente il manuale d'uso.

## LANCIARE UN CICLO

Al termine dell'endoscopia, effettuare immediatamente un pretrattamento dell'endoscopio prima di introdurlo nella macchina. In assenza di un protocollo convalidato, vedere il capitolo 2 del manuale d'uso. Collocare l'endoscopio al Soluscope ENT con il connettore adeguato.

Per i cicli 6 e 8 : connettere

Per accedere al menu iniziale, premere su **MAIN**, appare il messaggio seguente:

Ora corrente → 12:22:15 Premi F3  
 Numero di cicli già effettuati → 1526 per avviare

Premere su **F3** e seguire attentamente le istruzioni dei diversi messaggi sul display. Al termine dell'acquisizione deve apparire la schemata seguente:

Ciclo scelto → Avvio Ciclo 6: F3  
 1000 NON DE

Senza endoscopio

Chiudere il coperchio senza forzare e premere su **F3** per l'avvio del ciclo.

**MAIN** per riacquisire i dati

**F1** per interrompere il ciclo