


**DIE ZYKLEN** (vollständige Liste siehe Gebrauchsanweisung)


<b>Zyklus 1 "Standard"</b>	<b>Zyklus 2 "Alkohol trocknen"</b>	<b>Zyklus 3 "Duodenoskope" und "erstes Mal"</b>	<b>Zyklus 4 Zu Tagesbeginn</b>	<b>Zyklus 6 "Selbst- desinfektion"</b> <i>Unmittelbar nach Endoskopprogramm durchführen, oder noch vor dem Proram falls das Gerät über 72</i>	<b>Zyklus 8 "Entkalkung"</b>
Dichtigkeitstest	Dichtigkeitstest	Dichtigkeitstest	Dichtigkeitstest	Desinfektion Gerät + 0.2µ Filter mit Chlor	Entkalkung Gerät + 0.2µ Filter
Vorreinigung	Vorreinigung	Vorreinigung	Vorreinigung	Spülen	Spülen
Reinigung	Reinigung	Reinigung 2x Dosis 2x Zeit	Desinfekt. 5	Desinfektion Gerät + 0.2µ Filter mit Gluta	Desinfektion Gerät + 0.2µ Filter mit Gluta
Spülen	Spülen	Spülen	Spülen	Spülen	Abfluss
Desinfekt. 5	Desinfekt. 5	Desinfektion 2xDosis 15Min.	Durchblasen***	Desinfektion Gerät + 0.2µ Filter mit Gluta	Durchblasen***
Spülen	Spülen	Spülen	DAUER*:12min.	Abfluss	DAUER*: 50min
Durchblasen***	Durchblasen***	Durchblasen***	<b>Zyklus 5 Nur</b>	Spülen	
DAUER*:15min.	Alk. Einspritz. **	DAUER*:35min.	Durchblasen***	Durchblasen***	
	Durchblasen***		Alk. Einspritz. **	Durchblasen***	
	DAUER*:16min.		Durchblasen***	DAUER*: 25'+5'	
			DAUER* : 2min.		

**ZYKLUS STARTEN**

Das Endoskop unmittelbar nach Gebrauch vorreinigen, dann ins Gerät einlegen. Falls kein gültiges Protokoll vorliegt → siehe Gebrauchsanweisung 2. Kapitel.


Anhand der Endoskopnummer die geeigneten Verbindungen wählen und anschliessen (siehe Abschnitt « Wahl der Verbindungssteile»)

→ **Für Zyklus 6:**  anschliessen und 12 Chlortabletten zu 1.5g aktivem Chlor aufs Bodengitter der Wanne legen.

→ **Zyklus 8:**  anschliessen und 1x Dosis Soluscope Anti-Kalkmittel in die Wanne geben.

Haube sorgfältig schliessen

Ausgangsmenü starten: dazu "ESC" drücken.

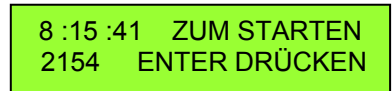

**"ENTER" drücken und die angezeigten Anweisungen befolgen.**

- **Mit den (→) Pfeilen**, den Cursor bewegen
- **Um eine Eingabe zu annullieren**, "ESC" drücken
- **Um den laufenden Zyklus abzubrechen**, 3 Sekunden lang auf " +/- " drücken

**DIE ANWEISUNGEN AUF DIESEM BLATT BEFREIEN DEN ANWENDER KEINESFALLS VON DEM SORGFÄLTIGEN LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG**

\* Zyklusdauer kann je nach Endoskopart und Filterbelastung +/- 2 Min abweichen

\*\* Wenn Alkoholooption verfügbar und aktiviert ist.

\*\*\* Das im Gerät durchgeführte Durchblasen ist ausreichend, um das Endoskop in kurzer Zeit erneut gebrauchen zu können. Falls das Endoskop längere Zeit gelagert werden soll, müssen die Endoskopkanäle von Hand mit medizinischem Gas getrocknet werden.