


CICLOS DISPONIBLES (Lista completa en el modo de empleo)


Ciclo 1 "Normal"	Ciclo 2 "Secado Alcohol"	Cycle 3 "Duodenoscopios" y "primera vez"	Ciclo 4 Principio De día	Ciclo 6 "Autodesinfección" Debe lanzarse justo al final del programa y antes si su Soluscope no ha sido utilizado desde por lo menos 72 H	Ciclo 8 "Desincrustación"
Prueba estanq.	Prueba estanq.	Prueba estanq.	Prueba estanq.		Desincrustación Máquina + Filtro 0.2µm
Prelimpieza	Prelimpieza	Prelimpieza	Prelimpieza		Enjuague
Limpieza	Limpieza	Limpieza 2x Dosis 2x tpo	Desinf. 5 min.	Desinfección Máquina + Filtro 0.2µm con cloro	Desinfección Máquina + Filtro 0.2µ bajo gluta
Enjuague	Enjuague	Enjuague	Enjuague	Enjuague	Drenaje
Desinf. 5 min.	Desinf. 5 min.	Desinfección 2xdosis 15min.	Secado ***	Desinfección Máquina + Filtro 0.2µ bajo gluta	Secado ***
Enjuague	Enjuague	Enjuague	DUR *:12min.	Drenaje	DUR *: 50min
Secado***	Secado ***	Secado ***	Ciclo 5 Secado solo	Enjuague	
DUR *:15min.	inyecc. Alcohol		Secado ***	Secado ***	
	Secado ***		inyecc. Alcohol		
	DUR *:16min.	DUR*:35min.	Secado ***		
			DUR *: 2min.	PUESTA EN REPOSO Para volver a utilizar la máquina Pulsar "ENTER"	
				Enjuague	
				Secado ***	
				DUR *: 25'+5'	

LANZAR UN CICLO

A partir del final de la endoscopia, hacer un pretratamiento del endoscopio antes puesta en máquina. En ausencia de un protocolo validado→ ver modo de empleo Capítulo 2l

Con el N° de endoscopio, elegir los conectores adaptados y conectarlo (Cf. Doc "Elección de los conectores")

→ **Ciclo 6:** conectar  y poner 12 pastillas de cloro a 1.5g de cloro activo sobre la rejilla de fondo de cuba.

→ **Ciclo 8:** conectar  u poner 1x dosis de desincrustante Soluscope en la cuba.

Cierra el casquillo sin forzar

Inicio menu de recepción (Pulsar "ESC" para visualizarlo).



Pulsar "ENTER" y seguir atentamente las instrucciones en la pantalla.

- Para mover el cursor, pulsar las teclas de dirección (→)
- Para cancelar la grabación, pulsar "ESC" Para interrumpir el ciclo en curso, pulsar "ESC", y luego +/- durante 3 segundos.

ESTAS INSTRUCCIONES NO EXIMEN EL USUARIO LEER ATENTAMENTE EL MODO DE EMPLEO

* Las duraciones de los ciclos pueden variar en función del tipo de endoscopio y del relleno de los filtros (+/- 2min.).

** Cuando la opción alcohol es disponible y activada.

*** El secado efectuado por la máquina es suficiente para permitir la utilización nueva del endoscopio en un corto plazo. En caso de almacenamiento prolongado, secar manualmente los canales del endoscopio con aire medical.