


CYCLES DISPONIBLES (Liste complète dans le mode d'emploi)


Cycle 1 Simple nettoyage	Cycle 2 Double nettoyage	Cycle 3 Double dose désinfectant et 15' de temps de contact	Cycle 4 Désinfection sans nettoyage	Cycle 6 "Autodésinfection" Après chaque programme quotidien et avant chaque programme si la machine n'a pas été utilisée depuis au moins 72 H	Cycle 8 "Détartrage"
Test d'étanch.	Test d'étanch.	Test d'étanch.	Test d'étanch.		Détartrage Machine + Filtre 0.2µm
Pré-nettoyage	Pré-nettoyage	Pré-nettoyage	Pré-nettoyage		Rinçage
Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Désinf. 5 min.	Désinfection Machine + Filtre 0.2µm au chlore	Désinfection Machine + Filtre 0.2µm sous gluta
Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Vidange
Désinf. 5 min.	Nettoyage	Nettoyage	Soufflage***	Désinfection Machine + Filtre 0.2µm sous gluta	Soufflage***
Rinçage	Rinçage	Rinçage		Vidange	DUREE*: 40min
Soufflage***	Désinf. 5 min.	Désinfection 2xdoses 15min.	DUREE*:18min.		
DUREE*:17min.	Rinçage	Rinçage			
	Soufflage***	Soufflage***	Cycle 5 Séchage seul		
	inject. Alcool **	Rinçage	Soufflage***	MISE EN VEILLE Pour réutiliser la Machine Taper"ENTER"	
	Soufflage***	Soufflage***	inject. Alcool **	Rinçage	
	DUREE*:19min.	DUREE*:35min.	Soufflage***	Soufflage	
			DUREE* : 5min.	DUREE*:45 min	

LANCER UN CYCLE

Dès la fin de l'endoscopie, faire un prétraitement de l'endoscope avant mise en machine. En l'absence d'un protocole validé → voir mode d'emploi

Avec le N° d'endoscope, choisir la connectique appropriée et le connecter (Cf. doc "Choix des connectiques »)

→ **Cycle 6**: connecter  et mettre 12 pastilles de chlore a 1.5g de chlore actif sur la grille de fond de cuve .

→ **Cycle 8**: connecter  et mettre 1x dose de détartrant Soluscope dans la cuve.

Fermer le capot sans forcer

Départ menu d'accueil (Press "ESC" to display it).

8 :15 :41 POUR DEMARRER
2154 TAPER ENTER

Taper "ENTER" et suivre attentivement les instructions sur l'afficheur.

- **Pour déplacer le curseur**, appuyer sur les touches de direction (→)
- **Pour annuler la saisie**, appuyer sur "ESC"
Pour interrompre le cycle en cours, appuyer sur " +/- pendant 3 secondes

CES INSTRUCTIONS NE DISPENSENT PAS L'UTILISATEUR DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI

* Les durées des cycles peuvent varier en fonction du type d'endoscope et du colmatage des filtres (+/- 2min.)

** Lorsque l'option alcool est disponible et activée.

*** Le soufflage effectué par la machine est suffisant pour permettre la réutilisation de l'endoscope dans un court délai. En cas de stockage prolongé, sécher manuellement les canaux de l'endoscope à l'air médical.