


GÄNGIGE ZYKLEN (vollständige Liste siehe Gebrauchsanweisung)

Zyklus 1 einfache Reinigung	Zyklus 2 zweifache Reinigung	Zyklus 4 "zu Tagesbeginn"	Zyklus 6 "Selbstdesinfektion" 12 Chlortabletten zu 1,5g Chlor Bereitlegen (6 in der Wanne und 6 in den Diskonnektion Tank) Diesen Zyklus unmittelbar nach dem Endoskopprogramm durchführen oder noch vor dem Programm, falls das Gerät mehr als 72 Stunden stillstand. Desinfektion mit Chlor des Diskonnektionstanks + Vorfiltereinheit + Gerät + 0.2µm Filter Spülen Desinfektion Gerät + 0.2µm Filter mit Glutaraldehyd Abfluss "WARTESTELLUNG" Vor erneutem Gebrauch "F3" drücken Spülen Durchblasen interner Kreisläufe DAUER* : 45 + 5 Min.	Zyklus 8 "Entkalkung Soluscope" Entkalkung Gerät + 0.2µm Filter Spülen Desinfektion Gerät + 0.2µm Filter mit Glutaraldehyd Spülen Durchblasen *** DAUER*:50Min.
Dichtigkeittest	Dichtigkeittest	Dichtigkeittest		
Vorreinigung	Vorreinigung	Vorreinigung		
Reinigung	Reinigung	Desinfekt. 5Min.		
Spülen	Spülen	Spülen		
Desinfekt. 5Min.	Reinigung	Durchblasen ***		
Spülen	Spülen	DAUER*:15Min.		
Durchblasen***	Desinfekt. 5Min.	Zyklus 5 Zusätzliches Durchblasen		
DAUER*:20Min.	Spülen	Durchblasen ***		
	Durchblasen ***	Alkoholeinspritzung**		
	Alkoholeinspritzung**	Durchblasen ***		
	Durchblasen ***	Alkoholeinspritzung**		
	DAUER*:22Min.	Durchblasen ***		
		DAUER* : 2Min.		


ZYKLUS STARTEN

Das Endoskop unmittelbar nach Gebrauch vorreinigen, dann ins Gerät einlegen. Falls kein gültiges Protokoll vorliegt → siehe Gebrauchsanweisung 2. Kapitel.

Anhand der Endoskopnummer die geeigneten Anschlüsse wählen und Anschliessen (siehe Abschnitt « Wahl der Anschlüsse »)


→ Für Zyklus 6 und 8 :  anschliessen

Ausgangsmenü starten: dazu Main oder F1 drücken .

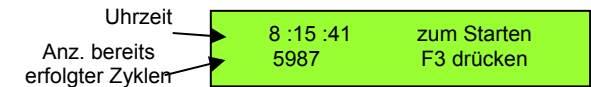


F3 drücken und sorgfältig die Anweisungen in der Anzeigeeinheit befolgen.

"Barcode erfassen "....." => zwingende Erfassung anhand des Barcodelesers, ansonsten kann die Eingabe nur von Hand erfolgen. Die Datenerfassung ist beendet, wenn folgende Anzeige erscheint.

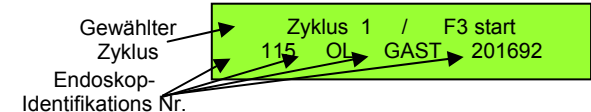

Haube behutsam schliessen und F3 drücken, um den Zyklus zu starten.

Zyklus 6 : sowie folgende Anzeige erscheint, Chlortabletten in die Öffnung neben dem Luftfilter einfügen.

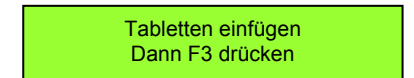

Main UM DATEN ERNEUT ZU ERFASSEN

F1 UM EINEN ZYKLUS ZU UNTERBRECHEN

DIE ANWEISUNGEN AUF DIESEM BLATT BEFREIEN DEN ANWENDER KEINESFALLS VON DEM SORGFÄLTIGEN LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG.

* Zyklusdauer kann je nach Endoskopart und Filterbelastung +/- 2 Min abweichen

** Wenn Alkoholooption verfügbar und aktiviert ist.

*** Das im Gerät durchgeführte Trocknen ist ausreichend, um das Endoskop in kurzer Zeit erneut gebrauchen zu können. Falls das Endoskop längere Zeit gelagert werden soll, müssen die Endoskopkanäle von Hand mit medizinischem Gas getrocknet werden.