

CYCLES LES PLUS UTILISÉS (liste complète dans le mode d'emploi)

CYCLES DE TRAITEMENT

CYCLE 1 Simple nettoyage	CYCLE 2 Double nettoyage + injection d'alcool **	CYCLE 4 Désinfection sans nettoyage
Test d'étanchéité	Test d'étanchéité	Test d'étanchéité
Rinçage préliminaire	Rinçage préliminaire	Rinçage préliminaire
Nettoyage	Nettoyage	Désinfection
Rinçage	Rinçage	Rinçage
Désinfection	Désinfection	Soufflage
Rinçage	Rinçage	15 min *
Soufflage	Soufflage	
20 min *	Injection d'alcool **	
	Soufflage **	
	22 min *	

AUTRES CYCLES

CYCLE 6 Auto-désinfection	CYCLE 8 Détartrage
• Au moins une fois toutes les 24 h ou après chaque programme quotidien. • ⚠ Si colmatés, changer les filtres avant de lancer le cycle 6.	Détartrage
Désinfection au chlore : bac de disconnection + unité de pré-filtration + filtre à eau terminal 0,2 µm + machine	Rinçage
Rinçage	Désinfection
Désinfection glutaraldéhyde : filtre à eau terminal 0,2 µm + machine	Rinçage
Recirculation horaire dans les circuits jusqu'à activation du rinçage (touche F3)	Soufflage
Rinçage différé, lancement par l'utilisateur	30 min *
Soufflage	
50 min *	
	CYCLE 5 Soufflage additionnel
	Soufflage
	Injection d'alcool **
	Soufflage **
	4 min *



Le soufflage seul permet de réutiliser l'endoscope rapidement. En cas de stockage prolongé (une nuit ou plus) les canaux de l'endoscope doivent être séchés avec de l'air filtré 0,2 µm.



Les instructions contenues sur cette fiche ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement le mode d'emploi.


* Les durées des cycles peuvent varier en fonction du type d'endoscope, du colmatage des filtres ainsi que de la température de l'eau (+/- 2 min).

** Soluscope 3 avec l'option alcool activée.

LANCER UN CYCLE

Dès la fin de l'endoscopie, toujours faire un prétraitement de l'endoscope avant sa mise en machine (voir **Préparation de l'endoscope avant traitement**, au chapitre 2 du mode d'emploi de votre Soluscope 3).

Connecter l'endoscope à votre Soluscope à l'aide de la connectique appropriée (choisie selon le numéro de l'endoscope).

Pour les cycles 6 et 8 : connecter 

Départ menu d'accueil (appuyer sur **MAIN** ou **F1**).

Heure courante → 12:22:15 Taper F3
Nombre de cycles déjà effectués → 1526 pour démarrer

Appuyer sur **F3** et lire attentivement les instructions sur l'afficheur. En fin de saisie, l'écran suivant apparaît :

Cycle choisi → Cycle 1 / F3 Start
1257 OL GAST 201692

Référence Endoscope →

Fermer le capot sans forcer et appuyer sur **F3** pour lancer le cycle.

POUR LE CYCLE 6 :

Tout d'abord disposer 6 pastilles de chlore dans la cuve et fermer le capot. Puis, attendre le message ci-dessous avant d'insérer 6 autres pastilles de chlore dans le bac de disconnection (via le "pousse-pastilles").



Chlore introduit ?
F1: Non F3: Oui



MAIN pour saisir à nouveau les données

F1 pour interrompre le cycle