

CICLI PIÙ UTILIZZATI (elenco completo nel manuale d'uso)

CICLI DI TRATTAMENTO

CICLO 1 Semplice pulizia	CICLO 2 Doppia pulizia + irrigazione con alcool **	CICLO 4 Disinfezione senza pulizia
Prova di tenuta	Prova di tenuta	Prova di tenuta
Prepulizia	Prepulizia	Prepulizia
Pulizia	Pulizia	Disinfezione
Risciacquo	Risciacquo	Risciacquo
Disinfezione	Pulizia	Spurgo e insufflazione
Risciacquo	Risciacquo	15 min *
Spurgo e insufflazione	Risciacquo	
20 min *	Disinfezione	
	Risciacquo	
	Spurgo e insufflazione	
	Iniezione d'alcool **	
	Spurgo e insufflazione **	
	22 min *	

ALTRI CICLI

CICLO 6 Autodisinfezione	CICLO 8 Disincrostazione
<ul style="list-style-type: none"> Almeno una volta ogni 24 ore e dopo ogni programma quotidiano. Prima di ogni programma se la macchina non è stata utilizzata da più di 72 ore. ⚠ Se intasati, cambiare i filtri prima di lanciare il ciclo 6. 	Disincrostazione
Disinfezione con cloro: vaschetta di deposito + unità di prefiltrazione + filtro ad acqua terminale 0,2 µm + macchina	Risciacquo
Risciacquo	Disinfezione
Disinfezione con glutaraldeide: filtro acqua terminale 0,2 µm + macchina	Risciacquo
Pompaggio nei circuiti ogni ora fino ad attivazione del risciacquo (tasto F3)	Spurgo e insufflazione
Risciacquo differito, lancio da parte dell'utente	30 min *
Spurgo e insufflazione **	CICLO 8 Spurgo e insufflazione supplementare
50 min *	Spurgo e insufflazione
	Iniezione d'alcool **
	Spurgo e insufflazione **
	4 min *



Lo spurgo e insufflazione da soli consentono di riutilizzare rapidamente l'endoscopio in caso di stoccaggio prolungato (una notte o più): i canali dell'endoscopio devono essere asciugati con aria filtrata a 0,2 µm.



Le istruzioni contenute su questa scheda non dispensano mai l'utente di leggere attentamente il manuale d'uso.

* La durata dei cicli può variare in funzione del tipo di endoscopio, dell'intasamento dei filtri e della temperatura dell'acqua (+/- 2 min).

** Soluscope 3 dotato dell'opzione alcool e se attiva.

LANCIARE UN CICLO

Al termine dell'endoscopia, effettuare immediatamente un pretrattamento dell'endoscopio prima di introdurlo nella macchina (vedere **Preparazione dell'endoscopio prima del trattamento** al capitolo 2 del manuale d'uso del vostro Soluscope 3).

Collegare l'endoscopio al vostro Soluscope 3 per mezzo delle adeguate connessioni (scelte secondo il numero dell'endoscopio). Vedere l'allegata **Scelta dei tipi di collegamento (Connectics Choice)**.

Per i cicli 6 e 8 : collegare

Per accedere al menu iniziale (premere **MAIN** o **F1**).

Ora corrente → 12:22:15 Premi **F3**
 Numero di cicli già effettuati → 1526 per avviare

Premere **F3** e seguire attentamente le istruzioni dei diversi messaggi sul display.

Al termine dell'inserimento la videata seguente appare:

Ciclo scelto → Ciclo 1 / F3 Avvio
 Riferimento endoscopio → 1257 OL GAST 201692

Chiudere il coperchio senza forzare e premere **F3** per il lancio del ciclo.

PER IL CICLO 6 :

Primo di tutto, aggiungere 6 pastiglie di cloro nella vasca e chiudere il coperchio.

Quindi, **attendere** il messaggio qui di seguito prima di inserire altre 6 pastiglie di cloro nella vaschetta di accumulo (attraverso l'orificio di inserimento situato sulla parte frontale della macchina).



Cloro inserito ?
 F1: No F3: Si

MAIN per inserire di nuovo i dati

F1 per interrompere il ciclo