

**DIE ZYKLEN** (vollständige Liste siehe Gebrauchsanweisung)

<b>Zyklus 1 : Einmal Reinigen</b>	<b>Zyklus 2 : Zweimal Reinigrn</b>	<b>Zyklus 4 : Desinfektion ohne Reinigung</b>	<b>Zyklus 6 : Selbstdesinfektion. Täglich oder bei Wasserfilterwechsel oder nach 72 Stunden Stillstand.</b>
Dichtigkeitstest	Dichtigkeitstest	Dichtigkeitstest	Desinfektion Diskonnektionstank
Vorreinigung	Vorreinigung	Vorreinigung	Desinfektion Vorfiltereinheit + 0.2µm Wasser-Endfilter
Reinigung	Reinigung	Desinfektion	Desinfektion Gerät
Spülen	Spülen	Spülen	Stündlicher Umlauf in den Kreisläufen
Desinfektion	Reinigung	Durchblasen***	WARTESTELLUNG Vor erneutem Gebrauch "F3" drücken
Spülen	Spülen	DAUER : 18*Min.	Durchblasen der inneren Kreisläufe
Durchblasen***	Desinfektion		DAUER : 50 * Min.
DAUER : 20*Min.	Spülen		
	Durchblasen***		
	DAUER : 22*Min.		

**ZYKLUS STARTEN**

Das Endoskop unmittelbar nach Gebrauch vorreinigen, dann ins Gerät einlegen. Falls kein gültiges Protokoll vorliegt → siehe Gebrauchsanweisung Kapitel 2.

Anhand der Endoskopnummer die geeigneten Verbindungen wählen und anschliessen (siehe Abschnitt « Wahl der Verbindungsteile»)

→ Für Zyklus 6 :  anschliessen

Ausgangsmenü starten: dazu Main oder F1 drücken .

Uhrzeit → 8 :15 :41 zum Starten  
Anz. → 5987 F3 drücken

bereits **F3 drücken und sorgfältig die Anweisungen an der Anzeigeeinheit befolgen.**

"Barcode erfassen "....." ⇒ zwingende Erfassung anhand des Barcodelesers, ansonsten kann die Eingabe nur von Hand erfolgen. Die Datenerfassung ist beendet, wenn folgende Anzeige erscheint.

Gewählt → Zyklus 1 / F3 start  
115 OL GAST 201692  
Endosko →

Haube behutsam schliessen und F3 drücken, um den Zyklus zu starten.

**Main** UM DATEN ERNEUT ZU ERFASSEN

**F1** UM EINEN ZYKLUS ZU UNTERBRECHEN

**DIE ANWEISUNGEN AUF DIESEM BLATT BEFREIEN DEN ANWENDER KEINESFALLS VON DEM SORGFÄLTIGEN LESEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG**

\* Zyklusdauer kann je nach Endoskopart und Filterbelastung +/- 2 Min abweichen

\*\*\* Das im Gerät durchgeführte Durchblasen ist ausreichend, um das Endoskop in kurzer Zeit erneut gebrauchen zu können. Falls das Endoskop längere Zeit gelagert werden soll, müssen die Endoskopkanäle von Hand mit medizinischem Gas getrocknet werden.