

CICLOS LO MAS UTILIZADOS (Lista completa en em modo de empleo)

Ciclo 1 : Simple limpieza	Ciclo 2 : Doble limpieza	Ciclo 4 : Desinfección sin limpieza.	Ciclo 6 : Auto desinfección Después cada programa diario y cambio de filtros de agua y antes cada programa si la maquina no fue utilizada desde mas de 72H
Prueba de Estanq	Prueba de Estanq	Prueba de Estanq	Desinfección Tanque de disconnexion
Pre-limpieza	Pre-limpieza	Pre-limpieza	Desinfección Unidad de prefiltración + Filtro 0.2µm de agua
Limpieza	Limpieza	Desinfección	Desinfección maquina
Enjuague	Enjuague	Enjuague	Recirculación Horaria de los circuitos
Desinfección	Limpieza	Secado***	Maquina en vela Para reutilizar la maquina Presionar sobre F3
Enjuague	Enjuague		Secado De los circuitos intérnales
Secado***	Desinfección		DURACION : 50 + 7* min.
DURACION : 20*	Enjuague	DURACION : 18* min.	
	Secado***		
	DURACION : 22* min.		

LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FICHERO NO EXIMEN EL USUARIO DE LEER CON ATENCION EL MODO DE EMPLEO.

* Las duraciones de los ciclos pueden cambiar según el tipo de endoscopio y del relleno de los filtros (+/- 2min.)

*** El secado hecho por la maquina es suficiente para permitir la reutilización del endoscopio en un pequeño tiempo. En caso de almacén prolongado, secar a la mano los canales del endoscopio con aire medical.

LANZAR UN CICLO

Al fin de la endoscopia, hacer un pretratamiento del endoscopio antes de ponerlo en la maquina. En ausencia de un protocolo validado → ver modo de empleo Capitulo 2.

Con el N° de endoscopio, elegir la conexion y conectarla (Cf. doc "Eleccion de las conexiones »)

→ Para ciclo 6 : Conectar

Desde el menú : Presionar Main o F1 para entrar en.

Hora corriente	8 :15 :41	Presionar F3
Nbre de ciclos hechos	5987	para empezar

Presionar F3 y seguir con atención las instrucciones sobre la pantalla.

"Lectura código-barras "....." ⇒ entrada obligatoria con el lector código-barras sino, la entrada es manual únicamente. En fin de entrada la pantalla siguiente debe aparecer.

Ciclo elegido	Ciclo 1 / F3 start
Identificación Endoscopio	115 OL GAST 201692

Cerrar la tapa sin forzar y presionar F3 para lanzar el ciclo.

Main PARA REINTRODUCIR LOS DATOS

F1 PARA PARAR EL CICLO