

CICLI DISPONIBILI (Lista completa nelle istruzioni)

Ciclo 1 : Lavaggio semplice	Ciclo 2 : Doppio lavaggio	Ciclo 4 : Disinfezione semplice	Ciclo 6 : « Autodisinfezione » Dopo ogni programma quotidiano e dopo la sostituzione dei filtri dell'acqua e prima di ogni programma se la macchina non è stata utilizzata da più di 72 ore
Test di tenuta	Test di tenuta	Test di tenuta	
Prelavaggio	Prelavaggio	Prelavaggio	
Lavaggio	Lavaggio	Disinfezione	Disinfezione della vasca di separazione
Risciacquo	Risciacquo	Risciacquo	Disinfezione dell' unità di prefiltrazione + Filtro dell'acqua 0.2µm
Disinfezione 5 min	Lavaggio	Asciugatura***	Macchina per la disinfezione
Risciacquo	Risciacquo		
Asciugatura***	Disinfezione		
	Risciacquo		
DURATA: 20* min.	Asciugatura***	DURATA : 18* min.	Macchina in stand by Per riutilizzare la macchina premere su F3
			Asciugatura dei circuiti interni
	DURATA : 22* min.		DURATA : 50 + 7* min.

LE PROCEDURE INDICATE IN QUESTA PAGINA NON ESIMONO IN ALCUN CASO L'UTENTE DAL CONSULTARE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

* La durata dei cicli può variare a seconda del tipo di endoscopio e dell'ostruzione dei filtri (+/- 2min.)

*** L'asciugatura eseguita dalla macchina è tale da permettere il riutilizzo dell'endoscopio in breve tempo. In caso di stoccaggio prolungato, asciugare manualmente l'endoscopio con aria medica.


LANCIARE UN CICLO

Terminata l'endoscopia, sottoporre l'endoscopio a un pretrattamento prima della messa in macchina. Un breve protocollo di pretrattamento è indicato nelle istruzioni d'uso.

Insieme al N° di endoscopio da utilizzare, scegliere la connessione appropriata e connetterlo (Cfr. doc "Scelta delle connessioni")


→ Per il ciclo 6 : Connettere

Dal menu d'inizio (premere Main o F1 per accedervi).

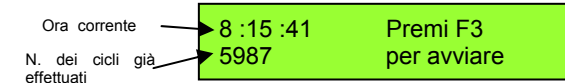

Premere F3 e seguire attentamente le istruzioni sul display.

"Lettura codici a barre "....." => inserimento solo tramite lettere codici a barre, altrimenti l'inserimento è da effettuarsi manualmente. Terminata l'operazione, sul display verrà visualizzato il seguente messaggio

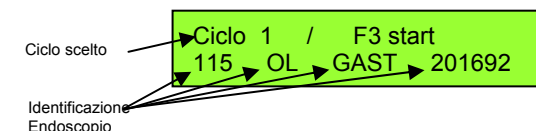

Chiudere il coperchio senza forzare e premere F3 per lanciare il ciclo.

Main PER REINSERIRE I DATI

F1 PER INTERRUPE IL CICLO