



Rappel : tout entretien doit être effectué par un personnel certifié *Soluscope*.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Q1** Contrôlez les dates d'ouverture portées sur les bidons des produits *Soluscope P*, *Soluscope A*, et *Soluscope C+*. Ces produits ont une durée de vie de deux mois après ouverture.
- Q2** Nettoyez le plateau de la machine, le rebord intérieur de la cuve, le capot (intérieur et extérieur) et le joint de capot, avec un spray désinfectant de surfaces.
Ne pas utiliser d'acétone ni aucun autre produit.
- Q3** Vérifiez que les derniers tickets n'affichent pas le message *DEBUT COLMATAGE FILTRE*. Si tel est le cas, changer les filtres avant de lancer le cycle 6.
- Q4** Lancez un cycle 6 d'auto-désinfection après vous être référé à la rubrique concernée au chapitre 5 du mode d'emploi de votre *Soluscope ENT*.
- Q5** Séchez et vérifiez les connectiques, et désinfectez les raccords avec un spray désinfectant de surfaces. Vérifiez l'absence de marques de plicature. Lubrifiez le joint de raccord de test d'étanchéité avec de l'huile silicone. Stockez les connectiques dans un endroit propre et sec.
- Q6** Assurez-vous que tous les tickets imprimés par la machine durant la journée ont bien été retirés et classés. **Y compris les tickets des cycles interrompus.**



Les connectiques défectueuses doivent être immédiatement déclarées hors service et retirées de la circulation.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE (à faire avant l'entretien journalier)

- H1** Vérifiez que la date indiquée sur le filtre à eau terminal 0,2 µm n'est pas dépassée. Si tel est le cas, changer les filtres.
- H2** Vérifiez que la date indiquée sur le filtre à air n'est pas dépassée. Si tel est le cas, changer le filtre.
- H3** Vérifiez que l'annexe **Tableau de suivi hebdomadaire** est correctement renseignée par les utilisateurs.

ENTRETIEN MENSUEL

- M1** Faites un prélèvement d'eau de rinçage de votre *Soluscope ENT* (voir annexe **Procédure de prélèvement d'eau de rinçage**). Contactez votre distributeur.

ENTRETIEN ANNUEL OU 4000 CYCLES (le plus court des deux termes)

- A1** Faites effectuer une maintenance préventive de votre *Soluscope ENT*. Contactez votre distributeur.
- A2** Faites re-qualifier votre *Soluscope ENT* en accord avec les dispositions de la *norme européenne EN 15883-4* portant sur les laveurs-désinfecteurs. Contactez votre distributeur.



En cas de détection de traces blanches sur l'endoscope ou dans la cuve, vérifiez le titre hydrotimétrique (degré TH) de l'eau et contactez votre distributeur.

IMMOBILISATION

- I1** Si votre *Soluscope ENT* doit être arrêté pour une durée de 72 heures ou plus, contacter votre distributeur afin qu'il vous donne les instructions à suivre pour procéder à cette immobilisation.