



Ricordate: qualunque operazione di manutenzione è riservata a personale abilitato Soluscope.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

- G1** Controllare le date di apertura indicate sui contenitori dei prodotti *Soluscope A*, *Soluscope P* e *Soluscope C+*. Questi prodotti hanno un periodo di validità di due mesi dopo la loro prima apertura.
- G2** Pulire il piano della macchina, il bordo interno della vasca, il coperchio (interno ed esterno) e la guarnizione della porta con uno spray disinfettante per superfici. **Non utilizzare acetone né alcun altro prodotto.**
- G3** Assicurarsi che gli ultimi ticket non visualizzino il messaggio *Inizio occlusione filtro*. Se così fosse, sostituire il filtro prima di avviare il ciclo 6.
- G4** Lanciare un ciclo 6 di autodisinfezione dopo aver consultato il capitolo 5 del manuale d'uso del vostro *Soluscope ENT*.
- G5** Asciugare e verificare i collegamenti, poi disinfettare i raccordi con uno spray disinfettante per superfici. Assicurarsi dell'assenza di qualsiasi segno di piegatura. Lubrificare la guarnizione di raccordo per la prova di tenuta con olio di silicone. Immagazzinare i materiali di collegamento in luogo asciutto e pulito.
- G6** Assicurarsi che tutti i ticket stampati dalla macchina durante la giornata siano stati ritirati e classificati, **inclusi i ticket dei cicli interrotti**. Conservateli al riparo dalla luce.



Le tubazioni e i raccordi difettosi devono essere immediatamente dichiarati fuori servizio e ritirati dalla circolazione.

MANUTENZIONE SETTIMANALE (da effettuarsi prima della manutenzione quotidiana)

- S1** Controllare che la data indicata sul filtro ad acqua terminale 0,2 µm non sia scaduta.
- S2** Controllare che la data indicata sul filtro aria non sia scaduta.
- S3** Assicurarsi che la **Tabella di controllo settimanale** sia debitamente compilata dagli operatori.

MANUTENZIONE MENSILE

- M1** Eseguire un prelievo dell'acqua di risciacquo del vostro *Soluscope ENT* (riferirsi all'allegato **Procedura di prelievo dell'acqua di risciacquo**) o contattare il vostro distributore autorizzato *Soluscope*.

MANUTENZIONE ANNUALE O OGNI 4000 CICLI (scegliere il periodo di tempo più breve)

- A1** Richiedere una manutenzione preventiva del proprio *Soluscope ENT*. Contattare il vostro distributore autorizzato.
- A2** Richiedere la riqualificazione del proprio *Soluscope ENT* secondo le disposizioni della normativa *ISO EN 15883-4* relativa alle macchine lava-disinfetta. Contattare il vostro distributore autorizzato.



In caso si rilevassero delle tracce bianche sull'endoscopio o nella vasca, controllare il titolo idrotimetrico (grado TH) dell'acqua e contattare il vostro distributore autorizzato.

FERMO MACCHINA

- FM** In caso di arresto di *Soluscope ENT* per 72 ore o più, contattare il vostro distributore autorizzato per ottenere le istruzioni da seguire nell'esecuzione del fermo macchina.