

BITTE ALLE WARTUNGS-INTERVENTIONEN UND IHRE FOLGEN IN DAS WÖCHENTLICHE KONTROLLBLATT EINTRAGEN !**TÄGLICHE WARTUNG :**

- T1. Öffnungsdaten der Chemikalienkanister **Soluscope-D** und **Soluscope-E** kontrollieren. Nach Öffnung sind die Chemikalien zwei Monate haltbar.
- T2. Bodengitter der Wanne in Dekontaminationsmittel abbürsten und wieder einlegen.
- T3. Innen- und Aussenrand der Wanne jeweils auf ca. 5 cm mit Alkohol reinigen. **Niemals Azeton verwenden.**
- T4. Türdichtung mit Alkohol reinigen. Diese muss vorerst aufgeblasen worden sein. Dazu Zyklus 10 starten.
- T5. 0,2µm-Wasserfilter untersuchen und evtl. austauschen (falls auf dem letzten Kontrollschein „0,2µm-Filter AUSWECHSELN“ vermerkt war) und auf alle Fälle den Selbstdesinfektionszyklus 6 starten.
- T6. Verbindungsteile trocknen und evtl. Knicke richten. Dichtigkeitstestverbindungen mit Silikonöl einölen. Defekte Verbindungen sind aus dem Betrieb zu nehmen.
- T7. Kontrollieren, dass alle am Laufe des Tages ausgedruckten Kontrollscheine aus dem Gerät entnommen und abgelegt wurden. **Dies gilt auch für abgebrochene Zyklen.**

WÖCHENTLICHE WARTUNG, VOR DER TÄGLICHEN WARTUNG DURCHZUFÜHREN :

- W1. Datum des 0,2µm-Wasserfilters kontrollieren. **90 Tage** nicht überschreiten.
- W2. Vorfilterpatronen nach Verstopfung kontrollieren. Bei der Wannenfällung dürfen die Manometerangaben nicht um mehr als 0.6 Bar überschritten werden.
- W3. Datum am Luftfilter kontrollieren. **1 Monat nicht überschreiten.**
- W4. **Anti-kalk Zyklus 8 starten.**
- W5. Kontrollieren, dass das wöchentliche Kontrollblatt durch alle Anwender regelmässig ausgefüllt wurde.

MONATLICHE WARTUNG :

- M1. Eine Wasserprobe aus dem Gerät entnehmen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Technischen Kundendienst.

JÄHRLICHE WARTUNG oder nach 2000 Zyklen (je nachdem welches zuerst eintritt)

- J1. Vorbeugende Pflege am Soluscope durchführen lassen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler.



Sollten weiße Flecken am Endoskop oder im Gehäuse auftreten, den Wasserhärtegrad überprüfen und Ihren TKD benachrichtigen.