

## EL SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO DEBE REGISTRARSE EN EL CUADRO DE SEGUIMIENTO SEMANAL

### DIARIA:

- Q1. Compruebe las fechas de apertura de las latas de Soluscope D y Soluscope E. Los productos tienen una duración de vida de dos meses después de apertura.
- Q2. Cepillar la rejilla de fondo de cuba en un detergente descontaminando y restablecerla.
- Q3. Limpiar el perímetro de la cuba y el interior sobre alrededor de 5cm con alcohol. **No utilizar acetona.**
- Q4. Limpiar la junta de puerta con alcohol. Para inflar la junta, lanzar un ciclo 5.
- Q5. Comprobar la necesidad eventual de sustitución del filtro 0,2µm de agua (ver "CAMBIAR: filtro 0,2µm" sobre el último ticket de tratamiento de endoscopio) y en todos los casos, lanzar un ciclo 6 de autodesinfección.
- Q6. Secar los conectores y comprobar la ausencia de plegados. Lubrificar los conectores de prueba de estanqueidad con aceite de silicona. connecteurs de test d'étanchéité avec de l'huile silicone. Toda conexión defectuosa debe ser declarada fuera de servicio.
- Q7. Asegurese que todos los tickets imprimidos por la máquina durante el día fueron retirados y clasificados. **Inclus los de los ciclos interumpidos.**

### SEMANAL, SE HACE ANTES DEL MANTENIMIENTO DIARIO:

- H1. Compruebe la fecha indicada sobre el filtro de agua 0,2 µm. **No debe superar 90 días.**
- H2. Compruebe el grado de relleno de los cartuchos de unidad de prefiltración. Los valores indicados por los manómetros no deben tener una diferencia de más de 0,6 bares durante el relleno de la cuba.
- H3. Compruebe la fecha indicada en el filtro de aire. **No debe superar un mes.**
- H4. **Lanzar un ciclo 8 de desincrustación.**
- H5. Compruebe que la ficha de seguimiento semanal está correctamente llenada por los usuarios.

### MENSUAL:

- M1. Haga una extracción de la máquina. Contacte su Servicio Post Venta.

### ANUAL o 2000 ciclos (el más corto de los dos plazos)

- A1. Haga hacer un mantenimiento preventivo de su Soluscope. Contacte su Servicio Post Venta.



En caso de detección de manchas blancas sobre el endoscopio y en la cuba, compruebe el grado TH del agua y contacte su S.P.V.