



Rappel : tout entretien doit être effectué par un personnel habilité Soluscope.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Q1** Contrôlez les dates d'ouverture portées sur les bidons des produits *Soluscope D* et *C+*. Elles ne doivent pas dépasser 2 mois après ouverture.
- Q2** Brossez la grille de fond de cuve dans un nettoyant pré-désinfectant, rincez-la et remettez-la immédiatement en place.
- Q3** Nettoyez le plateau de la machine, le rebord intérieur de la cuve (5 premiers centimètres en partant du bord), ainsi que le capot, avec un spray désinfectant de surface.
Ne pas utiliser d'acétone ni aucun autre produit.
- Q4** Nettoyez le joint de capot avec un spray désinfectant de surface. Pour gonfler le joint, lancez un cycle 10 (voir au chapitre 5 du mode d'emploi **Gonflage du joint de capot - Cycle 10**).
- Q5** Lancez un cycle 6 d'auto-désinfection après avoir vérifié le besoin ou non de remplacement du filtre (voir **Auto-désinfection du Soluscope 3 - Cycle 6**, chapitre 5 du mode d'emploi).
- Q6** Séchez et vérifiez les connectiques, puis désinfectez les raccords avec un spray désinfectant de surfaces. Vérifiez l'absence de marques de plicature. Lubrifiez le joint de raccord de test d'étanchéité avec de l'huile silicone. Stockez les connectiques dans un endroit propre et sec.
- Q7** Assurez-vous que tous les tickets imprimés par la machine durant la journée ont bien été retirés et classés, y compris ceux des cycles interrompus. Rangez-les bien à l'abri de la lumière.



Les connectiques défectueuses doivent être immédiatement déclarées hors service et retirées de la circulation.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE (à faire avant l'entretien quotidien)

- H1** Vérifiez que la date portée sur le filtre à eau 0,2 µm n'est pas dépassée. Si tel est le cas, remplacer le filtre à eau 0,2 µm et les cartouches de pré-filtration simultanément.
- H2** Vérifiez que les dates portées sur le filtre à air HEPA ne dépassent pas les périodes d'usage préconisées. Le remplacer le cas échéant.
- H3** Lancez un cycle 8 de détartrage (voir au chapitre 5 **Détartrage du Soluscope 3 - Cycle 8**).
- H4** Vérifiez que l'annexe **Tableau de suivi hebdomadaire** est correctement renseignée par les utilisateurs.
- H5** Procédez à l'entretien quotidien.

ENTRETIEN MENSUEL

- M1** Faites un prélèvement d'eau de la machine conformément à l'annexe **Procédure de prélèvement d'eau de rinçage**.

ENTRETIEN ANNUEL OU 2000 CYCLES (le plus court des deux termes)

- A1** Faites effectuer une maintenance préventive de votre *Soluscope 3*. Contactez votre distributeur autorisé.
- A2** Faites requalifier votre *Soluscope 3* en accord avec les dispositions de la norme *EN ISO/DIS 15883-4* portant sur les laveurs-désinfecteurs d'endoscopes. Contactez votre distributeur autorisé.



En cas de détection de traces blanches sur l'endoscope ou dans la cuve, vérifiez le titre hydrotimétrique (degré TH) de l'eau et contactez votre distributeur autorisé.

IMMOBILISATION

- I1** Si votre *Soluscope 3* doit être arrêté pour une durée de 72 heures ou plus, contactez votre distributeur autorisé afin qu'il vous donne les instructions à suivre pour procéder à cet arrêt prolongé.