



Ricordate: qualunque operazione di manutenzione è riservata a personale abilitato *Soluscope*.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

- G1** Controllare le date di apertura riportate sui bidoni dei prodotti *Soluscope D* e *C+*. Non devono superare le date di scadenza indicate sui bidoni.
- G2** Spazzolare la griglia di fondo della vasca con un detergente decontaminante, risciacquare e rimetterla immediatamente al suo posto.
- G3** Pulire il piano della macchina, il bordo interno della vasca (i primi 5 centimetri partendo dal bordo), e il coperchio con uno spray disinfettante per superfici. **Non utilizzare acetone o altri prodotti.**
- G4** Pulire la guarnizione del coperchio con uno spray disinfettante per superfici. Per gonfiare la guarnizione, lanciare un ciclo 10 (vedere capitolo 5 del manuale d'uso **Gonfiaggio della guarnizione del coperchio - Ciclo 10**).
- G5** Lanciare un ciclo 6 di autodisinfezione dopo aver verificato la necessità o meno di sostituire il filtro e fare riferimento a **Autodisinfezione del Soluscope 3 - Ciclo 6**, capitolo 5 del manuale d'uso.
- G6** Asciugare e verificare i collegamenti, poi disinfettare i raccordi con uno spray disinfettante per superfici. Verificare l'assenza di fessure e segni di piegatura. Lubrificare la guarnizione di raccordo per la prova di tenuta con olio di silicone. Immagazzinare i materiali di collegamento in luogo asciutto e pulito.
- G7** Accertarsi che tutti i ticket stampati dalla macchina durante la giornata siano stati correttamente ritirati e ordinati, compresi quelli dei cicli interrotti. **Conservateli ben al riparo dalla luce.**



I materiali di collegamento difettosi devono essere dichiarati immediatamente fuori servizio e tolti dalla circolazione.

MANUTENZIONE SETTIMANALE (da effettuare prima della manutenzione giornaliera)

- S1** Verificare che la data indicata sul filtro acqua 0,2 µm non sia già superata. Se è così, sostituire il filtro acqua 0,2 µm e le cartucce di prefiltrazione contemporaneamente.
- S2** Verificare che la data indicata sul filtro aria *HEPA* non sia già superata. Se è così, sostituitelo.
- S3** Lanciare un ciclo 8 di disincrostazione (vedere capitolo 5 del manuale d'uso: **Disincrostazione del Soluscope 3 - Ciclo 8**).
- S4** Verificare che l'allegata **Tabella di controllo settimanale** sia correttamente utilizzata dagli utenti.
- S5** **Procedere alla manutenzione giornaliera.**

MANUTENZIONE MENSILE

- M1** Effettuate un prelievo di acqua dalla macchina secondo l'allegata **Procedura di prelievo dell'acqua di risciacquo**.

MANUTENZIONE ANNUALE O 2000 CICLI (il più breve dei due tempi)

- A1** Far effettuare una manutenzione preventiva del vostro *Soluscope 3*. Contattate il vostro distributore autorizzato.
- A2** Far riqualificare il vostro *Soluscope 3* in accordo con le disposizioni delle norme *ISO/DIS 15883-4* che vertono sui dispositivi di lavaggio e disinfezione di endoscopi. Contattate il vostro distributore autorizzato.



Qualora rilevaste delle tracce bianche sull'endoscopio o nella vasca, verificate il titolo idrotimetrico (grado TH) dell'acqua e contattate il vostro distributore autorizzato.

FERMO MACCHINA

- FM** Se dovete spegnere il vostro *Soluscope 3* per un periodo di 72 ore o più, contattate il vostro distributore autorizzato perchè vi dia istruzioni per procedere correttamente a questo arresto prolungato.