



Lembrete: Todas as manutenções devem ser feitas por pessoal técnico autorizado.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

- D1** Verificar as datas de abertura que estão anotadas nas garrafas de *Soluscope D* e *Soluscope C+*. Elas não devem exceder as datas de uso indicadas.
- D2** Escove a grade do fundo do recipiente com um produto de limpeza de descontaminação e coloque-a de volta imediatamente.
- D3** Limpe a tampa, a parte superior do recipiente e 5 cm do interior com um spray desinfectante de superfície. **Não utilizar acetona ou qualquer solvente.**
- D4** Limpe o anel de vedação da tampa com um lenço desinfectante. Ver a secção **Limpeza do anel de vedação da tampa** a seguir nesta secção.
- D5** Inicie o ciclo 6 para auto-desinfecção após ter verificado a necessidade de substituir os filtros.
- D6** Seque e verifique as conexões e desinfecte seus conectores com um spray desinfectante de superfície. Verifique se não há furos ou torções. Lubrificar com óleo de silicone as juntas dos conectores para o teste de vazamento. Guarde os conectores em lugar seco e limpo.
- D7** Confirme se os impressos feitos pela máquina durante o dia foram recolhidos e preenchidos, **incluindo impressos de ciclos incompletos.**



Os Tubos e conectores com defeito devem ser retirados de uso.

MANUTENÇÃO SEMANAL

- S1** Verifique a data do filtro de água de 0,2 µm e dos cartuchos da unidade de pré-filtragem. Não deve ultrapassar a data de expiração. Substitua todos de uma só vez.
- S2** Verifique a data do filtro de ar. Não deve ultrapassar a data de expiração. Substitua o filtro.
- S3** Inicie o ciclo 8 para decapagem (consulte a secção **Decapagem do Soluscope 3 - ciclo 8**).
- S4** Confirme se o documento **Formulário de registo de manutenções** foi correctamente preenchido pelos utilizadores.
- S5** Realize a manutenção diária.

MANUTENÇÃO MENSAL

- M1** Recolha uma amostra da água do último enxágue do *Soluscope 3* de acordo com o procedimento **Procedimento de amostragem da água do enxágue**.

MANUTENÇÃO ANUAL OU A CADA 2000 CICLOS (o que ocorrer primeiro)

- A1** Leve seu *Soluscope* para a revisão. Entre em contacto com seu distribuidor.
- A2** Obtenha uma nova qualificação de seu *Soluscope* de acordo com a norma específica (ISO EN 15883-4). Entre em contacto com seu distribuidor.



Caso detecte depósitos brancos sobre o endoscópio ou no recipiente, verifique a dureza da água (grau TH) e contacte seu distribuidor.

PARADA PROLONGADA

- PP1** Caso seu *Soluscope* precise ficar inactivo durante 72 horas ou mais, entre em contacto com seu distribuidor para obter as instruções.