

DIARIO :

- D1. Comprueba las fechas de apertura escritas sobre las garrafas de Soluscope-P, Soluscope-A, y Soluscope-C. No se puede utilizar los productos dos meses después de su apertura.
- D2. Cepilla la rejilla de la cuba con un producto de decontaminación y re colócala correctamente.
- D3. Limpia alrededor de la cuba y por dentro con alcohol sobre 5 cm. **No usa acetona.**
- D4. Comprueba si se necesita el cambio del filtro de agua 0.2µm (Ver "Filtro bloqueado "en el lastimo ticket de tratamiento), por todos casos lanza un ciclo de auto desinfección 6
- D5. Seca las connectiones y desinfecta las connectioness con un spray de desinfección de superficie. Comprueba la presencia de agujero. Lubrifica la prueba leak test connectics with silicone oil. Store connectics in a dry and clean place. **Any defective connectic must be replaced immediately.**
- D6. Make sure that the tickets printed by the machine during the day have been taken out and filed. **Including unsuccessful cycles tickets.**

SEMANTAL , ANTES DEL MANTENIMIENTO DIARIO :

- S1. Comprueba la fecha del filtro de agua 0.2µm. No debe superar 90 días.
- S2. Comprueba la fecha de las cartuchos de prefiltración. No debe superar 90 días (**Cambia los dos en el mismo tiempo**).
- S3. Comprueba la fecha del filtro de aire. **No debe superar 1 mes.**
- S4. Comprueba que la hoja de mantenimiento es correctamente rellena por los usuarios.

MENSUAL :

- M1. Hace una exacción. Contacta vuestro distribuidor.

ANNUAL o 2000 ciclos (lo mas corto)

- A1. Hace un mantenimiento preventivo. Contacta vuestro distribuidor.
- Y2. Hace una calificación de vuestro Soluscope de acuerdo con los standards Europeanos (15883-4) que trata de las lavadoras. Contacta vuestro distribuidor.



Si hay rastros blancos sobre el endoscopio y en la cuba, comprueba la dureza del agua y contacta vuestro distribuidor.

Parada prolongada

- P.P.1: Si vuestra Soluscope debe ser parada 72 horas o mas, contacta vuestro distribuidor para que se dan las instrucciones para permitir la parada prolongada.