

QUOTIDIANAMENTE :

- G1. Controllate le date di apertura delle taniche di Soluscope P, Soluscope A, e Soluscope C. I prodotti si conservano per due mesi dopo l'apertura.
- G2. Spazzolate la griglia della vasca in un detergente decontaminante e reinsertela correttamente.
- G3. Pulite con alcool il bordo esterno della vasca, l'interno su circa 5 cm. **Non utilizzare acetone.**
- G4. Controllate la necessità eventuale di sostituzione del filtro terminale dell'acqua 0,2µm (vedi " Inizio ostruzione filtro 0,2µm" sull'ultimo ticket di trattamento dell'endoscopia) e in ogni caso lanciare un ciclo 6 di autodisinfezione.
- G5. Asciugate le connessioni e disinfettate i raccordi con uno spray disinfettante per superfici. Controllare l'assenza di eventuali buchi, tagli o lacerazioni. Lubrificare i connettori del test di tenuta con dell'olio di silicone. Stoccate le connessioni in un luogo pulito e secco. **Le connessioni difettose devono essere sostituite immediatamente.**
- G6. Assicurarsi che tutti i ticket stampati dalla macchina durante la giornata siano stati ritirati e ordinati. **Compresi quelli dei cicli interrotti.**

SETTIMANALMENTE, PRIMA DELLA MANUTENZIONE QUOTIDIANA :

- S1. Controllate la data indicata sul filtro terminale dell'acqua 0,2µm. Essa non deve superare i 90 giorni.
- S2. Controllate la data dell'ultima sostituzione delle cartucce indicata sul loro contenitore. Essa non deve superare i 90 giorni (**sostituirle entrambe contemporaneamente**).
- S3. Controllate la data indicata sul filtro dell'aria. **Essa non deve superare 1 mese.**
- S4. Controllate che la scheda di manutenzione sia correttamente compilata dagli utenti.

MENSILMENTE :

- M1. Fate un prelievo della macchina. Contattate il vostro distributore.

ANNUALMENTE o a 2000 cicli (al più breve dei due termini) :

- A1. Fate effettuare una manutenzione preventiva della vostra Soluscope. Contattate il vostro distributore.
- A2. Fate qualificare la vostra Soluscope in accordo con le disposizioni previste dalla normativa europea (15883-4) che concernono i dispositivi automatizzati per il lavaggio e la disinfezione. Contattate il vostro distributore.



In caso di presenza di tracce bianche sull'endoscopia e all'interno della vasca, controllate la durezza dell'acqua e contattate il vostro distributore.

IMMOBILIZZAZIONE :

- N.B. Se la vostra Soluscope deve rimanere inutilizzata per 72 ore o più, contattate il vostro distributore per avere le istruzioni necessarie per procedere a tale immobilizzazione.